



Swedish Hospital Supply AB

NOSEZZ®

Bruksanvisning

1) Placera Noseezz topp mellan långfinger och pekfinger. Placera sedan tummen på Noseezz undersida. Samma grepp som på en behållare med nässpray.



2) Pressa sedan ihop Noseezz. Behåll greppet och Noseezz komprimerad.



3) Sätt Noseezz topp försiktigt mot barnets näsborre så det är tätt mellan näsborre och toppen.



4) När toppen placerats mot näsborren och det är tätt mellan toppen och barnets näsborre. Släpp försiktigt ut Noseezz "bälg" för att suga rent snor.



Tryggt-Innovativt-Medkännande



Swedish Hospital Supply AB

NOSEZZ®

Rekommenderad rengöring: sug försiktigt upp kokande eller varmt vatten med Nosezz. Skaka Nosezz och tryck ut vattnet med kraft.

Gör rent Nosezz regelbundet efter användning.



www.swehospitalssupply.se

Tryggt-Innovativt-Medkännande